





- 1** Placer le **Smart Li-ion Power** dans le Smart Dryer. Puis clipser le joint de finition.

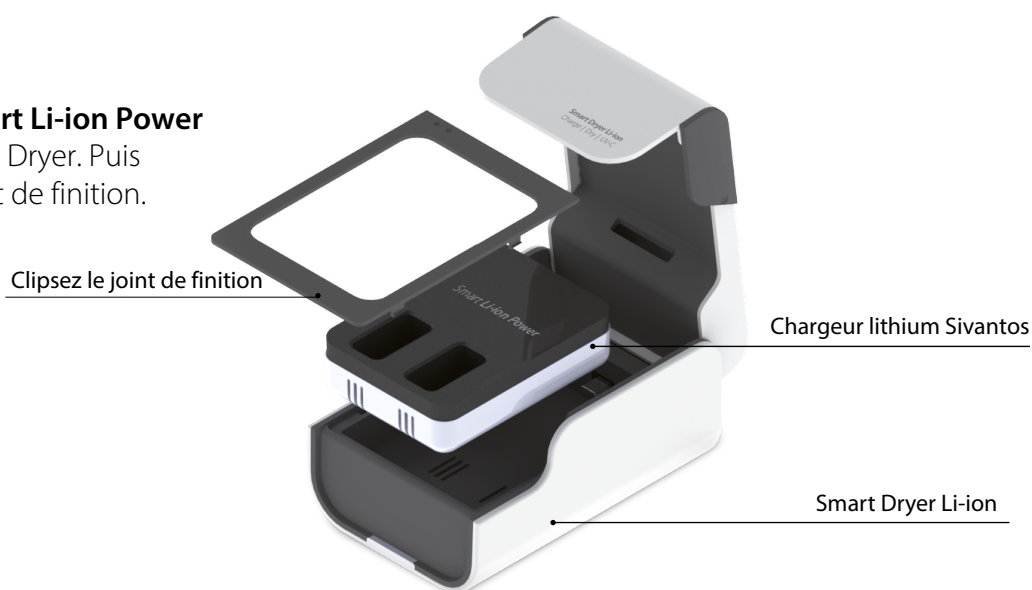

- 2** - Brancher le **Smart Dryer Li-ion**

- Le voyant bleu s'allume pour indiquer qu'il est sous tension

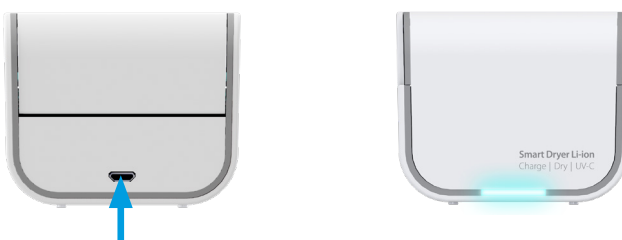

- 3** - Poser les appareils auditifs rechargeables au lithium dans leur emplacement. "*Comme indiqué dans la notice du chargeur*".

- Fermer le capot.



- 4** - Les cycles liés de chargement et de déshumidification démarrent dès la fermeture du boîtier.
- Le voyant bleu clignote lentement pendant toute la durée de charge des aides auditives.
  - Tant que les aides chargent, la déshumidification fonctionne.  
Le temps optimal de déshumidification est de 1h30, si la durée de charge est plus courte, la déshumidification finira son cycle de 1h30.
  - Une fois le cycle terminé (voyant éteint), retirer les aides auditives.
  - **Vous pouvez retirer les aides auditives du chargeur à tout moment et sans risques.**
  - Poser le Smart Dryer Li-ion sur une surface lisse et plane.
  - Ne pas obstruer l'entrée d'air sous le Smart Dryer Li-ion.